

Półmaski filtrujące FFP2 (10 sztuk)



Cena: 2,32 PLN

Opis słownikowy

Producent Pratt&Beck

Opis produktu

Cechy:

- Skuteczność filtracji $\geq 95\%$ PFE (0,3 μm)
- Regulowany zacisk nosowy zapewnia indywidualne uszczelnienie
- Niski opór oddychania przy wysokiej skuteczności filtracji
- Nie nadaje się do ponownego użycia
- CE 1437
- EN 149:2001+A1:2009 PREMIUM QUALITY
- WYPRODUKOWANO W POLSCE

Instrukcja użytkowania:

1. Wyciągnij półmaskę z opakowania, rozłóż formując zacisk nosowy i umieść półmaskę na twarzy.
2. Zaczep gumki o uszy i dopasuj półmaskę tak aby dokładnie przylegała do twarzy.
3. Obiema rękami dopasuj zacisk nosowy do kształtu nosa.
4. Sprawdź, czy półmaska jest założona prawidłowo i szczelnie przylega do twarzy - przyłóż dłoń do czaszy i wydmuchnij powietrze - jeżeli czujesz, że powietrze ucieka przy zacisku nosowym popraw jego kształt.

Ważne!

Zawsze upewnij się, że maska spełnia następujące wymagania:

- Musi dobrze pasować
- Musi być noszona bez przerwy przez cały czas zanieczyszczenia
- Nie używaj ponownie
- W razie potrzeby zmień

Galeria

